



ООО «МДДС»

121205, город Москва, тер Инновационного Центра Сколково, Большой
б-р, д. 30 стр. 1, эт. 1 помещ. 247

тел.: +7 (495) 580-80-95

e-mail: contact@mddc.ai

ОГРН 1217700384857, ИНН 9731082407

КПП 773101001

**Руководство по установке программного
обеспечения**

**"Фотоплетизмографическое сканирование
здоровья «Спектр», (ФСЗ «Спектр»)"**

Программные и аппаратные требования

Для запуска и работы ПО необходима ЭВМ со следующими параметрами:

- Установленная операционная система - Ubuntu 22.04 64-бит;
- Процессор: Intel i3 - 12100 (количество ядер – 4, 8 потоков);
- Оперативная память – DDR 8 ГБ;
- Жесткий диск – SSD 256 ГБ;
- Веб камера;
- Монитор с разрешением (1920*1080), вертикальная (книжная) ориентация в настройках ОС;
- Органы управления: клавиатура, мышь;
- Обязательное наличие установленных:
 - Docker;
 - Docker Compose.
- Наличие прав суперпользователя (sudo);

Инструкция по установке и получению доступа к ПО

Способ предоставления доступа - получение дистрибутива (docker-контейнера с ПО) по электронным каналам связи у разработчика. Инсталляция осуществляется вручную путём копирования контейнера с ПО (docker-контейнера) на ЭВМ медицинской организации. Деинсталляция осуществляется вручную путём удаления контейнера с ПО (docker-контейнера).

Инструкция по эксплуатации ПО

1. Откройте браузер (Google Chrome, Яндекс Браузер или другой совместимый) и перейдите по адресу: <http://localhost:8080>
2. Во вкладке браузера вы увидите экран сканирования, нажать на кнопку «Начать измерение».
3. Вы увидите свое изображение на экране, лицо берется в овал и начинается сканирование (сверху над овалом написан прогресс сканирования в %). Если вы видите свое лицо и сканирование не запускается, сократите дистанцию между лицом и камерой.
4. После завершения сканирования ПО переходит на экран вывода результатов сканирования.
5. Можно с помощью кнопки «Новое измерение» начать новое сканирование или закрыть вкладку и выйти из ПО.

Завершение работы с ПО

Сканирование параметров завершается автоматически после отметки в 100% прогресса сканирования на экране. Если требуется закрыть приложение, то это можно сделать стандартным способом, закрыв вкладку браузера.

Аварийные ситуации

При возникновении проблем со штатным функционированием ПО обратитесь в службу поддержки пользователей – напишите на адрес электронной почты contact@mddc.ai